

	<h1>CONDUGEL</h1>	Código: FT-0162
		Revisión: 01

GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO

Condugel es un dispositivo de uso médico formulado especialmente como medio de contacto para mejorar la transmisión ultrasónica en procedimientos terapéuticos, imágenes de diagnóstico u otros métodos que requieren un medio espeso, con propiedades lubricantes y deslizantes, sin correrse o secarse ni irritar la piel del paciente. No mancha la ropa, no deja residuos ni es pegajoso una vez retirado.

Instrucciones de uso

Aplicar una cantidad suficiente de gel en el área de interés antes de comenzar el procedimiento. Después de terminado, retire el exceso de gel con toalla de papel o un paño limpio.

Especificaciones técnicas

Aspecto	Gel viscoso, libre de partículas extrañas
Color	Incoloro
Aroma	Inodoro
pH (directo)	6.0 – 8.0
Viscosidad (a 20°C)	30.000 – 80.000 cPs (R6, 10 RPM)
Vida útil	24 meses

Precauciones

Evite el contacto con los ojos y la ingestión del gel. Mantener fuera del alcance de los niños, no utilizar en heridas abiertas o en pieles irritadas. En caso de ingestión, beber abundante agua, si se observa alguna reacción, acudir al médico. Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente.

Una vez abierto el envase, usar dentro de 30 días almacenando a temperatura ambiente.

Primeros auxilios

Ingestión	Beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico.
Contacto ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico en caso que persista algún síntoma.
Contacto dérmico	En caso de irritación, retire y enjuague con agua. Consulte a un médico.
Inhalación	No aplica.