

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE EQUIPOS DENTALES WK-455

DESCRIPCION

WK-455 es un preparado concentrado, libre de solventes residuales destinado a la limpieza y el mantenimiento simultáneos de escupideras, equipos dentales, instrumental y superficies de acero inoxidable.

WK-455 no es un limpiador convencional, está especialmente formulado para ser utilizado en separadores de amalgama, eliminar los residuos de cal, sangre, pastillas reveladoras de placa, material para moldes, etc.

WK-455 se caracteriza por un extraordinario poder limpiador y una excelente compatibilidad con el material. Limpia en profundidad, posee baja espuma, no tiene aromas que puedan quedar en las superficies. No contiene componentes abrasivos, de manera que las superficies no se rayan, no daña la pintura, aluminio, plásticos, gomas ni vidrios.

INSTRUCCIONES DE USO

WK-455 puede ser utilizado en forma directa o en dilución hasta 1:5. Pulverice la superficie con un poco de producto, distribúyalo y aplique acción mecánica ejerciendo una presión uniforme. Deje actuar por corto espacio de tiempo y después enjuague con agua limpia.

INFORMACION TECNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido translúcido
Color	Celeste
Olor	Característico
Ingrediente Activo (%Brix)	32.0 - 35.0%
Densidad	1.0 - 1.1 g/mL
pH (directo)	Menor a 1
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Completamente soluble en agua fría

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto ácido corrosivo, utilizar elementos de protección personal, guantes, lentes y ropa de seguridad. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco. No mezclar con otros químicos tales, como cloro, álcalis, oxidantes fuertes.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: no induzca vómitos. de a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua. si existe irritación, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua por 15 minutos. si la irritación persiste, consultar médico. en caso de inhalación: retirar a la persona afectada del lugar y llevar a un lugar ventilado. dar atención médica.