

Detergente Enzimático para Instrumental Naranja, WK-429N

Registro DGTM N° 12.600/05/671

DESCRIPCION

WK-429N es un producto concentrado base detergente penta-enzimático que aporta un poder de eliminación de toda suciedad orgánica como grasa, carbohidratos, proteínas, almidones. **WK-429N** puede ser usado para el lavado de estructuras, maquinarias y utensilios para eliminar residuos orgánicos, como son grasa de origen animal, vegetal o restos de frutas. **WK-429N** es un producto no corrosivo, de baja espuma. Posee un pH neutro en solución (pH diluido 6,5- 8,5) siendo seguro para el usuario y compatible con todo tipo de materiales: plástico, caucho, acero, vidrio y metales. **WK-429N** puede ser utilizado en pre-lavado, lavado manual y/o con lavadoras ultrasónicas. También en estanques, cubas, accesorios, vehículos de transporte, utensilios quirúrgicos etc.

INSTRUCCIONES DE USO

- Preparar dilución descrita en tabla de acuerdo a carga de suciedad.
- Mantener el instrumental completamente sumergido durante no más de 5 minutos.
- Realizar cepillado e irrigación de las zonas difíciles.
- Enjuagar abundantemente con agua potable.
- Continuar con desinfección o esterilización según corresponda.

Tipo de suciedad	Proporción	Dilución	Concentración %
Suciedad liviana	1:50	20ml/1L de solución	2%
Suciedad Pesada	1:20	50ml/1L de solución	5%
Para Instrumental	1:125 hasta 1:100	8 a 10ml/1L de solución	0.8% al 1%

INFORMACION TECNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido semi-viscoso, color naranja, aroma característico
Ingrediente Activo (%Brix)	12.0 – 15.0%
Viscosidad cPs (R3/100rpm/20-25° C)	Mayor a 300 cPs
pH (directo)	6.0 – 8.0
Estabilidad	18 meses en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Completamente soluble en agua fría

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Utilizar guantes y gafas. Mantener el producto en envase original en lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: no induzca vómitos, beber abundante agua. Consulte a un médico inmediatamente. En caso de contacto cutáneo: lavar con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua por 15 minutos, quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/ médico.