

## Multidiscos / Discogramas de sensibilidad microbiana

- 637100 Discograma Coprocultivo
- 637202 Discograma serie Gram (-)
- 637300 Sensidiscos Urocultivo
- 637402 Discograma serie Gram (+)

Método práctico y sencillo. Anillos llamados multidiscos o sensidiscos con combinaciones de antimicrobianos utilizadas para realizar las pruebas de sensibilidad. Estériles individuales, listos para su uso. Método útil ya que permite realizar una alta cantidad de ensayos simultáneamente reduciendo el tiempo del proceso. Cada antimicrobiano está identificado de manera inequívoca y sencilla. Fácil lectura e interpretación de resultados.



Conservar en un lugar fresco a entre -14 a 8 °C hasta la fecha de vencimiento.

Gram (+)				
Producto	Código	Potencia	Cepa ATCC*	Halo**
CEFAZOLINA	CEZ	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	21-27
CIPROFLOXACINO	CIP	5 mcg	<i>E. coli</i> 25922	30-40
CLINDAMICINA	DA	2mcg	<i>S. aureus</i> 25923	24-30
CLORAMFENICOL	C	30 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	19-26
ERITROMICINA	EM	15 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	22-30
GENTAMICINA	GE	10 mcg	<i>E. coli</i> 25922	19-26
OXACILINA	OX	1 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	18-24
PENICILINA G	P	10 UOF	<i>S. aureus</i> 25923	26-37
SULFATRIMETOPRIM	SXT	25mcg	<i>E. coli</i> 25922	23-29
TETRACICLINA	TE	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	18-25

Urocultivo				
Producto	Código	Potencia	Cepa ATCC*	Halo**
ACIDO PIPEMIDICO	PI	20 mcg	<i>E. coli</i> 25922	22-28
AMIKACINA	AK	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	19-26
AMPICILINA	AM	10 mcg	<i>E. coli</i> 25922	16-22
CEFADROXILO	CPH	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	15-21
CEFOTAXIMA	CTX	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	29-35
CEFUROXIMA <sub>iv</sub>	CXM	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	20-26
GENTAMICINA	GE	10 mcg	<i>E. coli</i> 25922	19-26
NITROFURANTOINA	NIT	300 mcg	<i>E. coli</i> 25922	20-25
NORFLOXACINO	NOR	10 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	17-28
SULFATRIMETOPRIM	SXT	25mcg	<i>E. coli</i> 25922	23-29

Gram (-)				
Producto	Código	Potencia	Cepa ATCC*	Halo**
AMIKACINA	AK	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	19-26
CEFADROXILO	CPH	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	15-21
CEFALOTINA	CF	30 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	29-37
CEFOTAXIMA	CTX	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	29-35
CEFTAZIDIMA	CAZ	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	25-32
CEFUROXIMA <sub>iv</sub>	CXM	30 mcg	<i>E. coli</i> 25922	20-26
CIPROFLOXACINO	CIP	5 mcg	<i>E. coli</i> 25922	30-40
CLORAMFENICOL	C	30 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	19-26
GENTAMICINA	GE	10 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	19-27
NITROFURANTOINA	NIT	300 mcg	<i>E. coli</i> 25922	20-25

Coprocultivo				
Producto	Código	Potencia	Cepa ATCC*	Halo**
AMPICILINA	AM	10 mcg	<i>E. coli</i> 25922	15-22
CLORAMFENICOL	C	30 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	19-26
FURAZOLIDONA	FZ	100 mcg	<i>E. coli</i> 25922	20-25
GENTAMICINA	GE	10 mcg	<i>S. aureus</i> 25923	19-27
NEOMICINA	N	30 mgc	<i>S. aureus</i> 25923	19-26
SULFATRIMETOPRIM	SXT	25mcg	<i>E. coli</i> 25922	23-29
SULFONAMIDA	SF	250 mcg	<i>E. coli</i> 25922	15-23

\* Inhibición del microorganismo de cepa ATCC

\*\* Halo estándar en mm de cepa inhibida